



B&B DENTAL  
IMPLANT COMPANY

**UN SOURIRE  
POUR TOUS**



## AVANTAGES DES IMPLANTS

02

## QU'EST-CE QUE C'EST UN IMPLANT ?

01

L'implant dentaire est une alternative fonctionnelle, confortable et efficace pour la racine de la dent sur laquelle la dent prothétique sera fixée, et il consiste en une vis en titane de quelques millimètres. Elle peut être insérée dans l'os pour remplacer la racine de la dent absente. Le titane est un matériel biocompatible qui limite la possibilité de rejet et permet aux tissus osseux environnants de croître autour au moyen d'un processus appelé ostéointégration qui permet la fixation définitive de l'implant. Quelques mois sont nécessaires - en général, de 3 à 6 - pour que ce processus finisse. Le dentiste décidera s'il existe la possibilité d'insérer les implants en évaluant plusieurs facteurs tels que le type, la position et le nombre d'implants à insérer sur la base de la quantité et la qualité de l'os existant, la charge des mâchoires et d'autres paramètres nécessaires au bon résultat du traitement. L'implant sera l'appui de la prothèse, qui est préparée dans le laboratoire dentaire et qui sera fixée sur celui-ci, pour ressembler à une dent naturelle.

IMPLANT SIMPLE



BRIDGE SUR  
IMPLANTS



ARCADE SUR  
IMPLANTS



Les implants permettent de continuer à sourire, de parler de manière naturelle et de manger n'importe quel repas. Ils peuvent être des solutions en cas de dents absentes ou même pour la reconstruction de toute l'arcade dentaire.

L'implant permet de remplacer une simple dent absente par une couronne, en obtenant ainsi le même effet qu'une dent naturelle, ce qui évite l'insertion d'un bridge. Ceci permet de maintenir les dents voisines intactes, ce qui est particulièrement utile si elles sont saines.

01

Le dentiste pourrait conseiller l'implantologie là où plusieurs dents sont absentes et il existe la possibilité de fracture du bridge traditionnel, de décimentation car il s'appuie sur des dents trop faibles. De cette manière, avec l'insertion de quelques implants, il sera possible d'éviter les ennuis causés par une éventuelle prothèse et de profiter du confort des dents fixes.

02

Lorsque l'absence de dents de l'arcade inférieure (mandibule) ou supérieure (maxillaire) est totale, les implants permettent d'éviter une prothèse mobile simplement appuyée sur les muqueuses, en fournissant un ancrage plus important, qui la rend plus stable, confortable pour parler, mâcher et sourire.

On peut choisir aussi une prothèse fixe si la quantité et la qualité d'os disponible le permettent. Cette solution est surtout fonctionnelle et elle permet un meilleur profil esthétique.

03



#### QU'EST-CE QUE C'EST L'IMPLANTOLOGIE ?

L'implantologie est la branche de l'odontologie qui s'occupe du remplacement des dents absentes au moyen d'implants. Ils peuvent remplacer la dent simple, servir d'appui pour bridges fixes ou être utilisés pour l'ancrage de prothèses amovibles.

Mettre des implants implique une intervention chirurgicale qui peut être suivie de troubles post-interventions, telles que gonflement et douleur sur la partie concernée. Même si le pourcentage de succès est très haut (95 % environ) il existe le risque d'échec qui peut se vérifier pendant les premiers mois par absence d'ostéointégration ou, ensuite par hygiène orale incorrecte, charge excessive des mâchoires ou d'autres causes.

## L'IMPLANTOLOGIE EST-ELLE DOULOUREUSE ?

Absolument pas, car on utilise de l'anesthésie locale pour l'intervention et elle s'effectue sur des tissus peu innervés. Pendant quelques jours il est possible d'avertir quelques ennuis et troubles qui peuvent être calmés avec des compresses de glace et des analgésiques. La douleur est de toute façon inférieure à l'extraction d'une dent.

## FUMEURS

On a vérifié que la probabilité de succès de l'insertion des implants dans les patients fumeurs est sensiblement plus basse. Pour cette raison, il est conseillé d'arrêter de fumer ou au moins de s'abstenir pendant quelques semaines en commençant une/ deux semaines avant l'intervention.





03

# **RISQUES ET DÉSAVANTAGES DES IMPLANTS**




04

# LES IMPLANTS SONT-ILS ADAPTÉS À MON CAS ?

Les conditions principales pour celui qui pense à la solution implantologique pour remplacer une ou plusieurs dents absentes sont les suivantes : avoir une quantité suffisante de tissu osseux, être en bonne santé et avoir des gencives saines. Il est convenable de souligner que le problème d'une disponibilité insuffisante d'os pour accueillir l'implant peut être surmonté, car dans beaucoup de cas il est possible d'intervenir en rétablissant un volume osseux adéquat. De toute façon, le dentiste doit évaluer si les implants sont appropriés à votre cas avec un rendez-vous, des radiographies (panoramiques), des modèles d'étude et éventuellement une T.C. Dentalscan.

Si vous pensez à une solution implantologique, vous devez être sérieusement motivé, car le succès et la durée des implants dépendent beaucoup d'une hygiène orale quotidienne très scrupuleuse, de rendez-vous de contrôle et de sessions d'hygiène professionnelle fréquents.

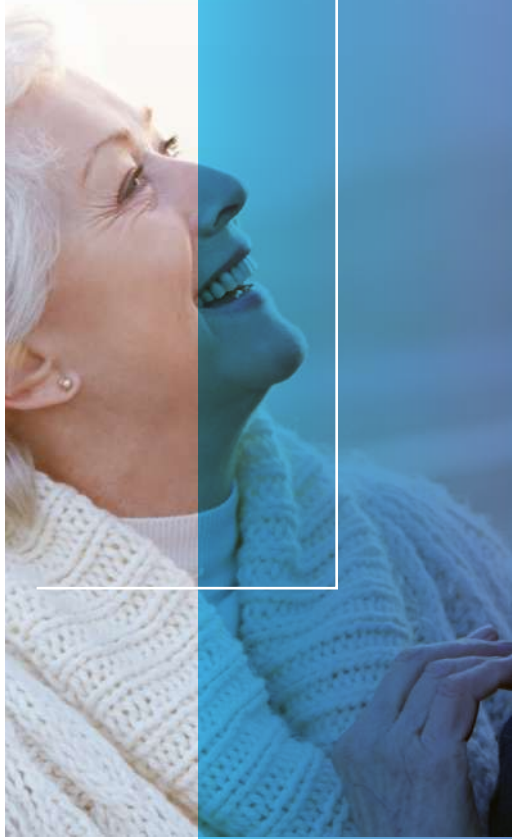



## COMMENT LES IMPLANTS SONT-ILS INSÉRÉS ?

Les implants s'insèrent au moyen d'une petite intervention chirurgicale réalisée normalement dans le cabinet du dentiste, qui peut durer de 20 à 60 minutes avec de l'anesthésie locale.

Une fois que l'implant a été inséré dans l'os, il faut attendre quelques mois afin qu'une parfaite ostéointégration se produise. Seulement à ce moment le pilier sur lequel la prothèse sera fixée pourra être inséré.

### **CHIRURGIE GUIDÉE PAR ORDINATEUR :**

La chirurgie guidée permet d'évaluer l'anatomie du patient de manière numérique pour construire une plateforme de guidage pour les instruments chirurgicaux uniquement au point spécifique où les implants seront insérés. De cette manière on pourra avoir une chirurgie beaucoup plus rapide. Le haut degré de précision et de planification de cette technique permet de préparer la prothèse dentaire en avance de façon à l'appliquer directement après l'insertion des implants. En résumé, la chirurgie guidée de manière numérique permet d'effectuer des diagnostics plus soignés qui arrivent à des plans de traitement plus spécifiques et à une exécution plus rapide, soignée en limitant les ennuis pour le patient.



05

# SOINS POST- INTERVENTION





**DOULEUR** : elle est similaire à celle qui suit l'extraction d'une dent, en général elle peut être contrôlée avec des médicaments analgésiques/anti-inflammatoires. Éviter les médicaments avec de l'acide acétylsalicylique (du type Aspirine), car ils pourraient interférer avec la coagulation du sang.

**GONFLEMENT** : appliquer fréquemment des compresses de glace sur la joue du côté intéressé, pendant les premières heures après l'intervention. Dormir avec la tête soulevée par un ou deux coussins surtout pendant les premières nuits.

**ANTIBIOTIQUES** : la prise préventive pourrait être conseillée pour prévenir des infections.

**EFFORTS PHYSIQUES** : éviter l'activité physique lourde ou sportive pendant la semaine suivant l'intervention.

**TABAC** : s'abstenir de fumer pendant une/deux semaines avant et pendant quelques mois après l'intervention.

**ALIMENTATION** : pendant les premiers jours, choisir des aliments liquides et non pas trop chauds, en évitant de mâcher sur la partie intéressée.

**HYGIÈNE ORALE** : effectuer l'hygiène orale normale et de manière très délicate sur la zone intéressée, jusqu'à ce que la gencive ne soit guérie.

06

# COMMENT PEUT-ON ENTREtenir LES IMPLANTS AVEC DES PROTHÈSES MOBILES ?

Une hygiène orale correcte, associée à des rendez-vous réguliers chez le dentiste, est fondamentale pour la durée des implants qui soutiennent les prothèses mobiles. En plus du nettoyage normal de la prothèse mobile (sans utiliser de l'eau chaude), brosser attentivement après chaque repas les fixations connectées aux implants et les nettoyer avec un tampon imbibé de collutoire, surtout au long du bord de la gencive.





# COMMENT PEUT-ON ENTREtenir LES IMPLANTS AVEC DES PROTHÈSES FIXE ?

Les rendez-vous de contrôle et les sessions d'hygiène orale professionnelle régulières, associées à un nettoyage scrupuleux à la maison sont fondamentales pour la durée des implants qui soutiennent une prothèse fixe.

Brosser après chaque repas, comme les autres dents, en faisant très attention à la zone où la prothèse rencontre la gencive.

Utiliser du fil interdentaire approprié avec une extrémité rigide (super floss), qui facilite l'insertion du fil interdentaire au-dessous du bridge et qui aide à le faire glisser dans l'espace entre la prothèse et la gencive.

La brosse interdentaire peut être utile dans les espaces interdentaires proches de la couronne ou du bridge qui recouvre l'implant, plus difficiles à atteindre. Utiliser avec des mouvements délicats répétés dedans-dehors, de manière plus précise au long du bord de la gencive.

# CONTACT

Via S. Benedetto, 1837 - 40018

S. Pietro in Casale (BO) Italy

**Tel.** +39 (0) 51.81.13.75

**Fax** +39 (0) 51.666.94.00

[info@bebdental.it](mailto:info@bebdental.it)

[www.bebdental.it](http://www.bebdental.it)

